

INFORMACIJE O UPORABI, PROSIMO PREBERITE NATANČNO!

HEMAGEL

PROCTO

HEMAGEL[®]

by Wake Ltd.

ZA POSPEŠITEV
CELJENJA RAN

CE 1023



Rektalne svečke

LASTNOSTI:

HemaGel[®] PROCTO nudi edinstveno rešitev za pospešeno celjenje akutnih in kroničnih ran ter analnih kožnih sprememb. **HemaGel[®] PROCTO** svečke se uporabljajo kot podpora pri zdravljenju hemoroidov in drugih boleznih danke, kot so boleče kožne razpoke (analne fissure) in sluznice (analne ragade).

HemaGel[®] PROCTO zmanjšuje bolečine, ki jih povzročajo analne razpoke, zmanjšuje krvavitve med odvajanjem blata in pospešuje celjenje.

SESTAVA:

HemaGel[®] PROCTO je bela svečka v obliki torpeda, ki vsebuje navzkrižno vezane kopolimere 2-hidroksietilmetakrilat z polimerno vezjo in sterilno zaščitene amino skupine. Razvili so ga na Inštitutu za makromolekularno kemijo, Akademije za znanost, v Češki Republiki.

KAKO UPORABITI SVEČKE:

- Vstavite svečko v danko, po odvajanju blata in umivanju, z zaobljeno konico naprej.
- Odrtgajte 1 svečko s traku vzdolž perforacije, jo nežno odtrgajte, olupite ovoj in odstranite svečko.
- Vstavite eno svečko z zaobljeno konico naprej globoko v danko, po možnosti v nekoliko upogibnem položaju.
- Dnevno uporabite eno svečko **HemaGel[®] PROCTO**, najbolje čez noč, razen če je po navodilih zdravnika drugače.

KONTRAINDIKACIJE:

Nobeni stranski učinki niso bili odkriti pri uporabi **HemaGel[®] PROCTO**. Pri preobčutljivih ljudeh je možno manjše draženje danke, kot so rahlo srbenje ali pekoč občutek, vendar to ne predstavlja ovire. Uporaba svečke ima lahko rahel odvajalni učinek.

OPOZORILO:

V primeru pojava stranskih učinkov, prenehajte z uporabo in se posvetujte z osebnim zdravnikom.

Hranite izven dosega otrok!

Ne uporabljajte po datumu uporabe, označen na ovojnini.

Zaradi svoje makromolekularne strukture **HemaGel[®] PROCTO** ne prodre v organizem. Zato lahko svečke uporabljajo vse starostne skupine, tudi nosečnice in doječe osebe. V vsakem primeru se posvetujte s svojim osebnim zdravnikom.

Bolezni danke potrebujejo posebno higieno in redno gibanje črevesja. Zato pijte ustrezno količino tekočin, jejte manj začinjeno hrano in povečajte vnos vlaknin.

V kolikor težave ne izginejo ali se stanje poslabša v roku 7 dni, se obvezno posvetujte z zdravnikom.

SHRANJEVANJE:

Hranite v originalni notranji ovojnini do 25 °C.

PAKIRANJE:

Vsebuje 5 rektalnih svečk pakirano v PVC/PE folijo.

DISTRIBUTER:

BITAX d.o.o.
Vrzdeneč 37, 1354 Horjul
Slovenija
www.hemagel.si

PROIZVAJALEC:

WAKE spol. s r.o.,
Jakubská 647/2, 110 00 Prague 1, Češka

Datum zadnje revizije: 4. 2. 2014