

MIKROZID® AF wipes

Alkoholni robčki za hitro dezinfekcijo manjših površin.

Sestava: en vsebnik vsebuje: 150 robčkov in 293 g raztopine aktivne snovi. 1 g raztopine aktivne snovi vsebuje: 0,25 g etanola (94 %) in 0,35 g 1-propanola. **Učinkovanje / čas učinkovanja (velja za raztopino aktivne snovi):** bakterije, glivice - po smernicah DGHM: 1 min. MRSA: multirezistentni Staphylococcus aureus - 1 min, Tb - 1 min, Adeno virusi - 2 min., Rota virusi - 30 sek., Polio virusi - 30 min., Papova SV 40 - 15 min., virusi z ovojnico* (vklj. s HIV, HBV, HCV) - 30 sek., DGHM seznam dezinfekcija površin v bolnišnicah in ordinacijah - 5 min., Poročilo št. 09/00 ÖGHMP - 1 min. *V skladu z Robert Koch Inštitute smernicami - German Federal Health Gazette 01/2004

Uporaba: Površino temeljito obrišite s prepojenim robčkom. Pazite, da je površina popolnoma navlažena in pustite učinkovati nekaj časa. Za uporabo na večjih površinah po potrebi uporabite več robčkov. **Posebna opozorila in pogoji shranjevanja:** Preprečite stik z očmi. Hraniti izven dosega otrok. Ne nanašajte na površine, ki so občutljive na alkohol, kot npr. akrilno steklo. **Oznaka po EU smernicah:** R10: Vnetljivo. **Proizvajalec:** Schulke & Mayr GmbH, Nemčija **Zastopnik za Slovenijo:** OPH Oktal Pharma d.o.o., Pot k sejmišču 26a, 1231 Ljubljana, Slovenija. T: +386 (0)1 519 29 22, www.oktal-pharma.si **Serija:** navedena na dnu vsebnika **LOT/ - rok uporabe:** naveden na embalaži **Pakiranje:** polnilo 150 robčkov