

SLO



LIMISAN PRO

odstranjevalec medicinskih lepil

PRED UPORABO LIMISANA PRO NATAČNO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO. NAVODILO SHRANITE, MORDA GA BOSTE PONOVRNO POTREBOVALI.

#### Kaj je LIMISAN PRO?

LIMISAN PRO je sprej za neboleče odstranjevanje različnih vrst medicinskih lepil. LIMISAN PRO je zasnovan tako, da omogoča hitro in neboleče odstranjevanje vseh vrst obližev in lepilnih trakov s kože, brez poškodb. Odstranjevanje lepil z LIMISAN PRO je do kože prijazno in spodbuja celjenje rane, ker preprečuje dodatne poškodbe povrhnjice, ki bi lahko nastale pri odstranjevanju obliža.

LIMISAN PRO je enostaven za uporabo in deluje že v nekaj sekundah. Sprej lahko uporabite tudi obrnjen navzdol.

LIMISAN PRO je zelo nežen izdelek, zato ne draži kože. LIMISAN PRO se hitro posuši in zato ne poslabša lepljivosti naslednjega obliža.

LIMISAN PRO vsebuje:

1. 50 ml spreja vsebuje: silikone, bisabolol, zelena meta, ARC-ekstrakt, butan, propan.
2. To navodilo za uporabo vsebuje vse informacije, ki jih potrebujete za uporabo LIMISAN-a PRO. Navodilo shranite.

#### Kako deluje LIMISAN PRO?

LIMISAN PRO vsebuje mešanico sestavin, ki hitro tvorijo sloj med lepilom obliža in kožo. Ta sloj prekine vezi v lepilu in tako omogoči nebolečo odstranitev obliža. Vse sestavine v LIMISAN-u PRO zelo hitro izhlapijo in na koži ne puščajo nobenih ostankov, kar omogoča takojšnjo namestitve novega obliža.

#### Kako uporabite LIMISAN PRO sprej na obližu ali lepilnem traku?

KORAK 1: Kadar želite odstraniti obliž ali lepilni trak s kože, npršite LIMISAN PRO po robu obliža ali vsej površini lepilnega traku, tako da se zmocni. Sprej ne sme priti v stik z očmi in sluznicami.

KORAK 2: Čakanje ni potrebno, obliž ali lepilni trak lahko takoj odstranite s kože. Če je potrebno, dodatno popršite LIMISAN PRO po površini obliža ali lepilnega traku. Obliž ali lepilni trak hitro odstranite, da ostanki lepila ne ostanejo na koži. Če se to zgodi, jih enostavno odstranite tako, da npršite LIMISAN PRO na robček in podrgnite ostanke.

KORAK 3: LIMISAN PRO se zelo hitro posuši, zato pred nameščanjem naslednjega obliža ni potrebno dodatno čiščenje.



#### Kako uporabite LIMISAN PRO sprej za odstranjevanje ostankov lepil s kože?

KORAK 1: Kadar želite odstraniti ostanke lepil s kože, npršite LIMISAN PRO na papirnati robček.

KORAK 2: Z mokrim robčkom podrgnite ostanke lepila in jih odstranite s kože.

#### Kako uporabite LIMISAN PRO sprej okoli oči?

KORAK 1: Kadar želite odstraniti obliž z okolice očesa, npršite LIMISAN PRO v pokrovček stekleničke.

KORAK 2: Pomočite vatirano palčko v tekočino v pokrovčku, da se navlaži.

KORAK 3: Z navlaženo palčko namažite robove obliža, nato ga nežno odstranite s kože.

#### Pomembno:

- LIMISAN PRO ne smete uporabljati, če ste alergični na eno izmed sestavin, ki jih izdelek vsebuje.
- Čeprav je izdelek LIMISAN PRO dokazano varen v stiku s kožo, svetujemo, da ga pred prvo uporabo nanesete na majhen predel kože.
- Sprej ne sme priti v stik z očmi in sluznicami. V slučaju da se to zgodi, spirajte oko s tekočo vodo.
- Izdelka ne vdihujte. Uporabljajte ga samo v dobro zračenih prostorih. V primeru, da se izdelek vdihne, premestite osebo na svež zrak, kjer naj diha v udobnem položaju.
- V primeru, da se pojavijo nepričakovane kožne reakcije, z uporabo izdelka takoj prekinite, in se posvetujte z zdravnikom. Če boste potrebovali dodatni zdravniški nasvet, imejte izdelek ali embalažo pri roki.
- Izdelek hranite pri sobni temperaturi. Ne izpostavljajte ga sončni svetlobi ali temperaturi nad 50° C. Hranite ga v prostorih, ki so dobro zračeni.
- Izdelka ne prebodite ali zažgite, četudi je že uporabljen.
- Izdelek shranjujete tako, da je nedosegljiv otrokom.
- Ta izdelek je visoko vnetljiv, zato ga hranite stran od vročine, isker, odprtega ognja, vročih površin. Med uporabo ne kadite.
- Izdelek je namenjen samo za zunanjo uporabo.
- Izdelka ne smete uporabljati po pretečenem roku uporabe, ki je natisnjen na embalaži.
- Preprečite sproščanje v okolje.



CE

LS16SL100  
59-31375-2300  
www.limisan.com  
Revised: July 2017



**Fabrikant / Manufacturer:**  
Archy Medical B.V.  
Westhove 119  
1187 DB Amstelveen  
The Netherlands

**Distributer SLO:**  
Tosama d.o.o.  
Šaranovičeva 035,  
1230 Domžale  
 **TOSAMA**  
Since 1923