

RIGENOMA®

pršilo
ERBAGIL

Za oskrbo poškodb, vnetij in
nečistoč na koži

z



OZOILE®

ERBAGIL PATENT

Stabilni ozonidi

NAVODILA

Rigenoma® pršilo z Ozoile® je namenjeno preprečevanju in oskrbi akutnih in kroničnih poškodb na koži zaradi različnih vzrokov. Tudi v primerih če obstaja tveganje za okužbe, kot so preležanine, žilne, presnovne razjede in razjede zaradi pritiska, kirurške rane, travmatske, kemoterapevtske in radioterapevtske poškodbe. Namenjeno je tudi preprečevanju in oskrbi dermatoloških težav, za katere je značilno vnetje, draženje, eritem, kseroza, srbenje, luščenje kože, spremembe flore, kožne bariere in možnosti okužbe kot v primeru mikoze.

GLAVNE SESTAVINE

OZOILE® (stabilni ozonidi z vitamin E acetatom), eterično olje Melaleuca Alternifolia (čajevca), tioktična kislina.

OZOILE®, stabilni ozonidi z vitamin E acetatom, je skupina inovativnih molekul, pridobljenih s patentiranim postopkom, ki deluje proti vnetju, srbečici, preprečuje hipoksijo, ustvarja neugodno okolje za širjenje patogenih mikrobov in spodbuja obnovo tkiva.

NAVODILO ZA UPORABO

Izdelek razpršite neposredno na prizadeto območje. Pri oskrbi akutnih in kroničnih kožnih poškodb različnih vzrokov. Najprej področje očistite z raztopino za izpiranje (čiščenje) rane, nato nanesite pršilo Rigenoma® na dno rane. Nanesite 1 razpršek na površino približno vsakih 4 cm², z razdalje približno 5 cm. Za dokončanje oskrbe rane nanesite enakomeren sloj Rigenoma® kreme na kožo okoli rane za več kot 5 cm okoli prizadetega območja. Na koncu pokrijte rano z Rigenoma® gazo za zaščito, ki vzdržuje vlažno okolje in pospešuje obnovo tkiv in regeneracijo z aktivnim delovanjem na rani. Rigenoma® pršilo nanesite enkrat ali dvakrat na dan. V primeru uporabe povoja in obloge je potrebno zamenjati oblogo na vsake 3 do 4 dni, oziroma po nasvetu zdravnika.

Pri oskrbi dermatoloških težav nanesite Rigenoma® pršilo 2 ali 3-krat na dan. Obdobje uporabe je različno in je odvisno od zahtevnosti poškodbe in hitrosti terapevtskega odziva.

OPOZORILA IN PREVIDNOSTNI UKREPI

Samo za lokalno uporabo. Ne zaužijte. Izdelek hranite izven dosega otrok. Ne uporabljajte, če je embalaža poškodovana. Ne uporabljajte medicinskega pripomočka po datumu uporabnosti. Datum uporabnosti se nanaša na nepoškodovan in pravilno shranjevan izdelek. Shranjujte v hladnem in suhem prostoru stran od virov toplote in neposredne sončne svetlobe. Shranjujte po možnosti med 5 °C in 35 °C. Pred uporabo medicinskega pripomočka si dobro umijte roke. Po uporabi stekleničko dobro zaprite. Po odprtju je priporočljivo uporabiti izdelek v 6 mesecih.

KONTRAINDIKACIJE

Rigenoma® pršilo večina ljudi zelo dobro prenaša. Kontraindicirano je pri preobčutljivosti na posamezne sestavine.

Ni primerov preobčutljivosti ali stranskih učinkov, če pa se slučajno pojavijo, prosimo, takoj prenehajte z uporabo in se posvetujte s svojim zdravnikom.


Ni znanih primerov prevelikega odmerjanja. Ni znanih interakcij z zdravili in drugimi medicinskimi snovmi.

PAKIRANJE

20 ml steklenička

brez glutena
brez barvil
brez alergenov
brez konzervansov

MEDICINSKI PRIPOMOČEK  0425

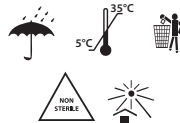

Uvoznik in distributer: MagPharm d.o.o.,
Dunajska cesta 181, 1000 Ljubljana
040 457 767, magpharm.si, info@magpharm.si

REV. 01 11/2020