



pršilo za odstranjevanje  
ušesnega masla in  
za ušesno higieno,  
izotonična raztopina z  
morsko vodo, 100 ml

**NAMEN:** Za izpiranje in čiščenje ušes odraslih z namenom preprečevanja nastanka zamaškov iz ušesnega masla ter njihovo lažje odstranjevanje.

**UPORABA:** Odstranite zaščitni pokrovček ter namestite pršilni nastavek na zgornji del pršila. Med uporabo držite pršilo pokonci, da ga lahko do konca izpraznete. Nagnite glavo rahlo v eno stran, vstavite pršilni nastavek v zunanji del slušnega kanala in pritisnite na pršilnik. Pršite 2-3 sekunde, počakajte nekaj sekund, nato nežno obrišite.

**ODMERJANJE:** Po potrebi, lahko večkrat na dan.

**SHRANJEVANJE:** Glejte opozorila.

**POZOR:** Ne uporabljajte pri vnetju ušes, predrtem bobniču, tujku v ušesu, vstavljenih ušesnih cevkah ali po operaciji ušes. Nastavek pršilnika po vsaki uporabi očistite ter posušite in ponovno zaprite z zaščitnim pokrovčkom. Če pršilo zaide v oči, oko izperite z vodo. Hraniti zunaj dosega otrok. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.

Ne preluknjajte ali sežigajte niti, ko je prazna. Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50° C/122° F.

**SESTAVINE** so navedene na proizvajalčevi deklaraciji.

**ROK UPORABE** je naveden na embalaži.

**Proizvajalec:** ISTITUTO GANASSINI di Ricerche Biochimiche

**Dobavitelj:** PHARMAGEA d.o.o., Delavska c. 24, 4208 Šenčur