

URINSKI TEST ZA ZGODNJE UGOTAVLJANJE NOSEČNOSTI

(za domačo uporabo)

Ne uporabljajte po preteku roka uporabe odtisnjene na zaščitni foliji.
Test shranjujte v suhem prostoru, pri temperaturi 4°- 30°C.
Test je namenjen za domačo uporabo. Samo za zunanjo uporabo.

REF SLO

POVZETEK IN DELOVANJE

Človeški horionski gonadotropin (hCG) je glikoproteinski hormon, ki ga izloča placenta kmalu po oploditvi. **FIRST SIGN™** je urinski test, ki zazna nizke koncentracije hormona hCG (>25mIU/ml) v urinu noseče ženske nekaj dni po oploditvi (še pred izostankom menstruacije). Rezultat se lahko pokaže v manj kot 5. minutah.

UPORABA

1. Testno palčico odstranite iz zaščitne folije.
2. Odstranite pokrovček in ga namestite na držalo, da s tem podaljšate velikost testne palčice in tako omogočite bolj higiensko uporabo.
3. Testno palčico primite za držalo, absorpcijsko konico izpostavite direktno toku vašega urina za vsaj 15 sekund, da se testna konica popolnoma namoči (glej sliko). Pomembno: ne urinirajte na plastični del testne palčice. Če želite, lahko urinirate v čisto in suho posodico ter vanjo pomočite absorpcijsko konico za vsaj 15 sekund.
4. Ko umaknete testno palčico iz urina, pokrijte absorpcijsko konico s pokrovčkom. Test položite na ravno podlago tako, da sta testno in kontrolno okence obrnjena navzgor, ter začnite meriti čas.
5. Ozadje testnega in kontrolnega okenca se sprva obarva rahlo roza. Rezultat odčitajte po 5. minutah.



NE ODČITAVAJTE REZULTATA PO 10. MINUTAH.

ODČITAVANJE TESTA

NOSEČNOST

Če se pojavita dve roza-vijolični črtici, ena v testnem okenčku (T), druga pa v kontrolnem okenčku (C), pomeni, da ste najverjetneje noseči. Ena črtica je lahko manj izrazita.




NI NOSEČNOSTI

Če se pojavi ena roza-vijolična črtica samo v kontrolnem okenčku (C), pomeni, da najverjetneje niste noseči.



NEVELJAVEN REZULTAT

Test je neveljaven, če se v kontrolnem okenčku (C) ne pojavi roza-vijolična črtica, četudi se črtica pojavi v testnem okenčku (T). V tem primeru morate testiranje ponoviti z novim testom.

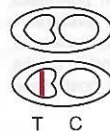

OMEJITVE

1. Uživanje alkohola ima lahko vpliv na rezultate testiranja. Ne priporočamo uporabo testa po uživanju alkohola.
2. Testiranje urinskih vzorcev ženske, ki je resnično šele na začetku nosečnosti in vsebuje zelo nizke koncentracije hCG-ja, lahko pokaže negativen rezultat. V tem primeru priporočamo ponovno testiranje po 48. urah.
3. V primerih, ko so v testiranem urinu prisotne izredno visoke koncentracije hCG-ja (>300IU/ml), lahko pride do t.i. Prozonovega efekta. V primeru suma nosečnosti je potrebno urin pred testiranjem razredčiti z vodo 1:1 in ponovno izvesti testiranje.
4. Skladno z drugimi diagnostičnimi postopki je potrebno rezultate testiranja evaluirati v luči ostalih kliničnih informacij in se pred nadaljnji medicinskimi odločitvami posvetovati z zdravnikom za postavitev dokončne diagnoze nosečnosti.

Datum zadnje revizije: 10.11.2017



Ni za ponovno uporabo



Samo za „in vitro“ diagnostično uporabo



Shranjujte med 4° in 30°C



Opozorilo: glejte navodilo za uporabo



Proizvajalec



Avtoriziran predstavnik v EU



Serijska številka



Uporabno do



Število testov v pakiranju



Kataloška številka



W.H.P.M. Bioresearch & Technology Co., Ltd
No.2 Zhongxin Street, LouZiZhuang, Jinzhanxiang,
Chaoyang District, Beijing, 100018, P.R. China



Medical Device Safety Service GmbH
Schiffgraben 41, 30175 Hannover, Germany

Zastopnik za Slovenijo in Hrvaško:

Sigeo d.o.o., Celovška 172, 1000 Ljubljana, Slovenija