


OTOSAN®

NATURAL CARE

NASAL SPRAY

BABY

PRŠILO ZA NOS

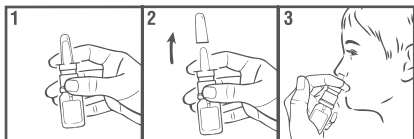

BLAGA HIPERTONIČNA RAZTOPINA (1,1 %) MORSKE VODE IZ BRETANJE Z EKOLOŠKO PRIDELANIM GELOM ALOJE VERE, EKOLOŠKO PRIDELANIM ETERIČNIM OLJEM POMARANČE, BAKROVIM GLUKONATOM IN KARBOKSIMETIL BETA-GLUKANOM.

UPORABA. Pršilo za nos Otosan® Nasal Spray Baby je nosni dekongestiv, ki deluje lokalno z osmozo ter pomaga zmanjšati zamašenost nosu in posredno tudi vnetje. Pršilo za nos Otosan® Nasal Spray Baby je hipertonična raztopina morske vode (1,1 %), obogatena s karboksimetil beta-glukanom, bakrovim glukonatom, ekološko pridelano alojo vero in eteričnim oljem pomaranče. Pršilo za nos Otosan® Nasal Spray Baby z večstranskim delovanjem lokalno čisti nosno votlino ter zmanjšuje količino odvečne sluzi v nosu in s tem pomaga zmanjšati njegovo zamašenost. Zahvaljujoč blagi formuli brez vazokonstriktorjev je izdelek še posebej primeren za otroke. Ne vsebuje potisnih plinov.

INDIKACIJE. Pršilo za nos OTOSAN® NASAL SPRAY BABY se priporoča kot prvo pomožno zdravljenje vnetnih stanj, kot so različne vrste rinitisa (virusni, bakterijski ali alergijski), sinusitis in izsušena nosna sluznica.

ODMERJANJE IN CILJNA POPULACIJA. Ta izdelek je namenjen za uporabo pri otrocih, vendar ga je treba uporabljati pod nadzorom odrasle osebe. Pred uporabo pri otrocih, starih od 1 do 3 leta, se posvetujte z zdravnikom. Priporočeni odmerek: 1 vpih na nosnico 2-do 4-krat dnevno, 10–15 dni.

OPIS. Hipertonična raztopina ob stiku s sluznico povzroči izločanje vode, ki z osmozo pomaga razredčiti nakopičeno gosto sluz in tako olajša njeno utekočinjenje. Zmanjšanje viskoznosti sluzi izboljša mukociliarno čiščenje in pomaga pri odstranjevanju virusov, bakterij, cvetnega prahu ter makro in mikro delcev z izločanjem sluzi.

Sestavine izdelka pomagajo izločiti odvečno sluz in imajo zaščitne ter posredno mehčalne in pomirjujoče učinke na razdraženo sluznico. Pršilo za nos Otosan® Nasal Spray Baby z odstranjevanjem odvečnih izločkov in nego sluznice z naravnimi snovmi, ki ustvarjajo neugodno okolje za bakterijske ali mikrobnе okužbe, zagotavlja olajšanje in preprečuje ponovitve bolezni.

PRENAŠANJE IN NEŽELENI UČINKI. Ker pršilo za nos OTOSAN® NASAL SPRAY BABY ne vsebuje vazokonstriktorjev in ker njegove sestavine delujejo nežno, se običajno dobro prenaša, njegova pogosta uporaba (največ 15 dni) pa ne povzroča tolerance ali tveganja za „rinitis medicamentosa“.

V redkih primerih lahko zaradi prisotnosti sestavin na osnovi bakra (Cu(II)) povzroči anozmijo.

V redkih primerih lahko povzroči epistakso.

V redkih primerih lahko pri preobčutljivosti na njegove sestavine povzroči lokalno alergijsko reakcijo. Takoj po nanosu lahko v nosnici začutite rahlo mravljinčenje. Če se pojavijo stranski učinki, ki niso opisani v tem dokumentu, se nemudoma obrnite na proizvajalca in se posvetujte s svojim zdravnikom.

NAVODILA ZA UPORABO. Pred uporabo pršila izpihajte nos.

Raztopino vpihnite v vsako nosnico ter pri tem držite glavo pokonci. Nato s kazalcem rahlo pritisnite na nosnico, da omogočite enakomerno razporeditev raztopine po celotni nosni sluznici. Blago in začasno mravljinčenje po nanosu je običajen stranski učinek izdelka. Po uporabi sperite nastavek s toplo vodo in ga osušite s papirnatim robčkom.

OPOZORILA IN PREVIDNOSTNI UKREPI.

- Izdelek hranite v suhem prostoru, stran od neposredne sončne svetlobe.
- Ne uporabljajte v primeru znane preobčutljivosti na sestavine izdelka.
- Izdelek uporabljajte pri sobni temperaturi (20–25 °C).
- Stekleničke ne izpostavljajte virom toplote.
- Ne uporabljajte v primeru poškodb nosne sluznice.
- Shranjujte zunaj dosega otrok.
- Ne uporabljajte pri otrocih, mlajših od enega leta.
- Pred uporabo pri otrocih, starih od 1 do 3 leta, se posvetujte z zdravnikom.
- Izogibajte se stiku izdelka z očmi.
- Ni primerno za uživanje.
- Ne nanašajte na poškodovano kožo.
- Ne uporabljajte v ušesnem kanalu.
- Izdelek uporabljajte samo v skladu s temi navodili za uporabo in samo za namene, ki jih je izrecno opredelil proizvajalec.
- Ne uporabljajte po izteku roka uporabnosti.
- Ne uporabljajte v primeru preobčutljivosti na rake in/ali mehkužce.
- V primeru neželenih reakcij ali neželenih učinkov takoj prekinite zdravljenje ter se posvetujte s svojim zdravnikom in obvestite proizvajalca.
- Steklenička je namenjena izključno osebni uporabi, saj se lahko v nasprotnem primeru z njo prenašajo okužbe.
- Sestavine pršila za nos OTOSAN® NASAL SPRAY BABY nimajo znanih kontraindikacij pri uporabi med nosečnostjo ali dojenjem; v teh primerih se pred uporabo izdelka posvetujte s svojim zdravnikom.

IZDELEK Z VEČSTRANSKIM DELOVANJEM S HITRIM DEKONGESTIVNIM UČINKOM, KI NEŽNO OČISTI NOSNO VOTLINO.

MORSKA VODA (KONCENTRAT) = DELUJE ČISTILNO IN POMIRJUJOČE.

Morska voda, ki se uporablja v formuli, izvira iz morja v bližini Bretanje. Njena sestava je podobna fiziološki raztopini in je še posebej bogata z mineralnimi hranili in elementi v sledovih. Hipertonična morska voda očisti nosno votlino ter odplakne prah in cvetni prah, poleg tega pa pospešuje mukociliarno čiščenje ter utekočinja odvečno sluz in tako olajša njeno izločanje.

EKOLOŠKO PRIDELANI GEL ALOJE VERE

EKOLOŠKO PRIDELANO ETERIČNO OLJE POMARANČE

BAKROV GLUKONAT = DELUJE ZAŠČITNO

KARBOKSIMETIL BETA-GLUKAN = DELUJE MUKOADHEZIVNO

Je polisaharid iz beta-glukana in se pridobiva z ekstrakcijo iz celičnih sten kvasovk in gliv.

ODLAGANJE MED ODPADKE

Izdelek je treba odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi o odstranjevanju odpadkov. Izdelka ali njegove embalaže ne odvrzite v okolje.



1000014368



Otosan Srl

Via degli Scavi, 32 - 47122 Forlì - Italy

Tel. +39.0543.795379 – otosan@otosan.com



1859

REV.2 16/05/2023