

Opis in predvidena uporaba:

Opornica za iztegovanje prstov. S prilagodljivo oporo v obliki obroča na zadnjem delu členka in odpornimi ergonomskimi blazinicami za distalni in dlančni del. Nastavljiv obroček zagotavlja iztegovanje prsta in omogoča upogibanje, v kolikor je za okrevanje to potrebno. Dimenzije izdelka se glede na model gibljejo med 70 mm in 90 mm v dolžino ter 57 mm v širino.

Indikacije:

Zdravljenje retrakcije ali poškodbe upogibne tetive medfalangealnih sklepov prsta. Retrakcija tkiva na dlančnem delu prsta ali prstnih sklepov. Pooperativna in post-travmatska ekstenzija proksimalnega interfalangealnega sklepa.

Previdnostni ukrepi:

- Pred uporabo opornice natančno preberite ta navodila. Če imate kakršna koli vprašanja, se posvetujte s svojim zdravnikom ali z ustanovo, kjer ste jo kupili.
- Da bi opornica služila svojemu namenu, mora biti pravilno prilagojena morfologiji pacienta. Prva namestitvev in prva nastavitvev opornice morata biti opravljeni pod nadzorom usposobljenega osebja (zdravnika, ortopedskega tehnika ipd).
- Vedno je treba upoštevati splošna

navodila za uporabo in posebne indikacije, ki jih predpiše zdravnik.

- Zdravnik je oseba, ki je usposobljena za predpisovanje in odločanje o trajanju zdravljenja ter njegovem nadaljnjem spremljanju.
- Zdravnik mora oceniti možnost uporabe krem za lokalno uporabo skupaj z uporabo opornice. Če opazite kateri koli stranski učinek, bolezen kože ali preobčutljivost, nemudoma obvestite zdravnika.
- Na območjih s pritiskom kože ne sme biti poškodovana ali preobčutljiva.
- Čeprav opornica ni za enkratno uporabo, jo lahko uporablja le en uporabnik. Izdelka ne uporabljajte ponovno pri drugih osebah.
- Pravilna uporaba opornice je odvisna od stanja elementov, ki jo sestavljajo, zato jo je treba redno pregledovati. Zdravstveno osebje, ki spremlja zdravljenje pacienta, lahko ugotovi ustreznost izdelka ali smiselnost zamenjave, če je izdelek pokvarjen ali obrabljen.
- Priporočljivo je, da poskrbite za čiščenje hitrih zapiral mikro kavljcev, da ohranite njihovo funkcionalnost in odstranite vse materiale, ki so se morda prijeli nanje.
- Redno čistite izdelek in poskrbite za ustrezno osebno higieno.



PRIM, S.A.
Avenida del Llano Castellano, 43
Planta 3
28034 Madrid
España



Opornica za iztegovanje prstov

- Posvetujte se z zdravnikom, če lahko opornico odstranite med kopanjem ali prhanjem, v nasprotnem primeru pa opornico pokrijte ali zaščitite pred vodo.
- Ne dovolite, da bi se otroci igrali s tem izdelkom.
- Nekateri materiali izdelka NISO ognjevarni, zato je priporočljivo, da izdelka ne uporabljate v okoljih s prekomerno toploto, ognjem ali sevanjem.

Navodila za namestitev in nastavitev:

1. Vstavite prst med distalne in dlančne blazinice, ki morajo biti nameščene na notranji strani prsta, pri čemer mora biti blazinica, ki podpira območje členka (medialna blazinica), na zunanji strani prsta. Glejte sliko 1
2. Za pravilno prilagoditev opornice zaprite krilca in jih prilagodite premeru proksimalnega metakarpofalangealnega sklepa. Glejte sliko 2
3. Ko je opornica nameščena, jo je treba namestiti tako, da je dlančna blazinica postavljena nad metakarpofalangealnim sklepom prsta, distalna blazinica pa pod distalnim interfalangealnim sklepom prsta. Glejte sliko 3

Če opornica ne zagotavlja ustreznega pritiska za pravilno iztegovanje prsta,

jo prilagodite z nežnim pritiskom navzgor od blazinic na skrajnih koncih opornice. Ponavljajte postopek dokler ne dosežete zadostne iztegnjenosti prsta. Glejte sliko 4

Če opazite, da opornica premočno pritiska na prst, izvedite nasprotni postopek in previdno pritiskajte opornico od skrajnih koncev navzdol, dokler se pritisk ne zmanjša in je opornica med uporabo udobna. Glejte sliko 5

Opomba: Ko je opravljena prva nastavitev, ohranite to nastavitev pri odstranjevanju opornice. Prilagoditev bo treba nastaviti le za zmanjšanje vnetja prsta, če pacient opazi, da opornica ne zagotavlja pravilne iztegnjenosti.

Vzdrževanje izdelka – Navodila za pranje:

Opornico občasno ročno obrišite z vlažno krpo in jo nato osušite. Ne uporabljajte belila ali abrazivnih mil, ne likajte in ne čistite kemično. Izdelka ne izpostavljajte neposrednim virom toplote kot so peči, grelci, radiatorji ter ga ne neposredno izpostavljajte soncu ipd.

Opomba: Vsak resen incident, povezan z izdelkom, je potrebno sporočiti proizvajalcu in pristojnemu organu države članice, v kateri ima uporabnik in/ali pacient sedež.

