

# DERMOXEN® FLOREXIL

## vaginalna prha

S propolisom, timijanom, ekstraktom aloe vere in hialuronsko kislino – pripravljen za uporabo. Je medicinski pripomoček, narejen za zaščito membrane vaginalne sluznice v primeru atrofije in za obnovo fiziološkega pH vagine. Zahvaljujoč prisotnosti mlečne kisline in prebiotičnih vlaknin spodbuja zdravljenje vaginitisa in vaginoze.

Njena edinstvena sestava hialuronske kisline (natrijeva sol) s kompleksom ekstrakta aloe vere, propolisa, timijana, ameriškega slamnika in opuncije (indijska smokva) predstavlja sinergijsko formulo. DERMOXEN® FLOREXIL vaginalna prha je koristna za odstranjevanje prekomernega izcedka iz nožnice, ostankov krvi po menstruaciji ali za higieno po spolnem odnosu, saj zagotavlja prijeten občutek svežine in dobro počutje.

**SESTAVA:** Aqua, Lauryl Glucoside, Propylene glycol, PEG-40 hydrogenated castor oil, Sodium hyaluronate, Aloe Barbadosensis Leaf Juice, Alpha-Glucan Oligosaccharide, Lactic acid, Thymus Vulgaris Leaf Extract, Propolis, Opuntia ficus indica L. Mill, Echinacea Angustifolia Extract, Sodium Benzoate, Poloxamer 407, Phenoxyethanol, Sodium Gluconate, Chlorphenesin.

**NAVODILO ZA UPORABO:** Pred uporabo vaginalne prhe Dermoxen Florexil si temeljito umijte roke. Medicinski pripomoček za enkratno uporabo. Izdelek je namenjen za enkratno izpiranje po namestitvi mehkega nastavka na platenko, kot je opisano spodaj:



Prhanje nožnice opravite tako, da nežno vstavite mehki nastavek v nožnico in platenko stisnete na obeh straneh, dokler ni popolnoma prazna. Po uporabi platenko zavržite.

**ODMERJANJE:** 1 vaginalna prha na dan 5 dni zapored ali po nasvetu vašega zdravnika.

**OPOZORILA IN KONTRAINDIKACIJE:** Med nosečnostjo izdelek uporabljajte le po posvetu z zdravnikom. Ne uporabljajte v primeru vaginalnih ran ali lezij. Ne uporabljajte v kombinaciji z drugimi izdelki, tudi če imajo enako predvideno uporabo. Ne uporabljajte v primeru alergije na katero koli sestavino. Hraniti izven dosega otrok. Ne uporabljajte po datumu preteka roka uporabnosti, navedenega na embalaži. Ne uporabljajte, če je plastenka poškodovana. Izdelek z enkratnim odmerkom. Če se ponovno uporabi, ne moremo zagotoviti navedenih učinkov. Številka serije in rok uporabnosti: glejte na strani embalaže.

Dermoxen Florexil vaginalna prha je na voljo v 100 ml plastenki z nastavkom.



**Proizvaja:** Ekuberg Pharma, Via Tito schipa,  
6- Carpignano Salentino (Italia), [www.dermoxen.com](http://www.dermoxen.com),  
[ekuberg@dermoxen.it](mailto:ekuberg@dermoxen.it)

**Distribuir:** Merit HP d.o.o., Beograjska cesta 4,  
1000 LJUBLJANA, Slovenija, [www.merit-hp.si](http://www.merit-hp.si) 080 15 36

**REF** EKDX028 REV. 0 03/2021 **100 ml e**

### Legenda simbolov



Za enkratno rabo



Mejne temperature



Rok uporabe



Preberite navodila



Lot številka



Kataloška številka



Proizvajalec