


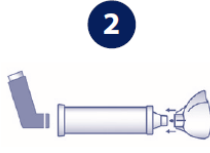
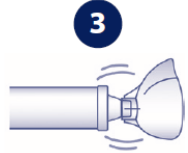

PiC Podaljšek za dajanje zdravil AirChamber

NAVODILO ZA UPORABO



Ne vsebuje BPA in lateksa iz naravne gume.





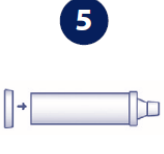
<p>PODALJŠEK AirChamber</p>						
<p>Podaljšek AirChamber je namenjen lažjemu doziranju zdravil astmatikov, ki uporabljajo dozator za zdravila pod pritiskom (razpršilec) za vnos zdravila, predpisanega s strani zdravnika. Podaljšek je namenjen uporabi doma, v bolnišnici ali na potovanju. Predpriprava podaljška ni potrebna. Priporočljivo je mesečno čiščenje podaljška. Podaljšek je namenjen uporabi enega uporabnika in ne več uporabnikov. Uporaba istega podaljška pri več ljudeh lahko privede do okužbe.</p>	<p>Odstranite pokrovček vašega razpršilca. Razpršilec dobro pretresite.</p>	<p>Razpršilec vstavite v odprtino podaljška AirChamber.</p>	<p>Ustnik podaljška AirChamber vstavite med ustnici tako, da zraku onemogočite prehajanje skozi usta. Pritisnite na razpršilec. V podaljšku boste nato opazili fino meglico. Počasi in globoko vdihnite in dah zadržite 5-10 sekund ali pa 4-6 krat vdihnite in izdihnite.</p>	<p>Pred ponovno izvedbo tretjega koraka počakajte vsaj 1 minuto. Vsakokrat uporabite le 1 dozo zdravila iz razpršilca</p>	<p>Če potrebujete tudi masko, le to trdno nastavite na podaljšek AirChamber in masko namestite na obraz tako, da prekrije usta in nos. Pri tem bodite previdni, da je nameščena tako, da dodobra tesni.</p>	<p>OPOMBA vedno sledite navodilom uporabe razpršilca in zdravila, ki vam ga je predpisal zdravnik. Pogoji shranjevanje in uporabe je 5-40°C (41-104°F) pri 15-95% relativni vlažnosti. Pred uporabo preverite, da je podaljšek AirChamber popolnoma nepoškodovan. V nasprotnem primeru ga ne uporabite. Prepričajte se, da se modri ventil podaljška med vdihovanjem premika.</p>

<p>SILIKONSKA MASKA</p>					
<p>OPOZORILO maska je zasnovana za uporabo z nastavkom standardnega premera 22mm. Prepričajte se, da je maska temeljito pričvrščena več čas.</p>	<p>Masko vzemite iz omota.</p>	<p>Masko nastavite na podaljšek AirChamber.</p>	<p>Prepričajte se, da je dodobra pričvrščena.</p>	<p>Masko nastavite na obraz preko ust in nosu in se prepričajte, da mimo ne uhaja zrak.</p>	<p>OPOMBA: V primeru kakršnekoli vidne poškodbe maske, le to zamenjajte. Silikonska maska ne vsebuje lateksa iz naravne gume. Masko lahko zavržete v mešane odpadke.</p>



Navodila za uporabo so splošne narave. V primeru dvomov ali vprašanj se obrnite na svojega zdravnika.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

<p>PODALJŠEK AirChamber</p>	<p>1</p> 	<p>2</p> 	<p>3</p> 	<p>4</p> 	<p>5</p> 	
<p>Podaljšek je za uporabo pripravljen takoj po tem, ko ga vzamemo iz omota. Po prvi uporabi je priporočljivo čiščenje enkrat mesečno, po potrebi pa ga je mogoče pomiti večkrat.</p>	<p>Dno (pokrovček podaljška) z odprtino ločite od telesa podaljška tako, da v odprtino vstavite palec in potegnete ven. Telo podaljška držite v drugi roki. Ustnega nastavka ni potrebno ločevati.</p>	<p>Sestavne dele operite s pomočjo tople vode in nežnega tekočega detergenta.</p>	<p>Pod tekočo vodo splaknite sestavne dele.</p>	<p>Iz podaljška odlite preostanek vode. Pustite, da se telo podaljška popolnoma posuši tako, da ga postavite vertikalno.</p>	<p>Ko se podaljšek posuši ponovno namestite dno (pokrovček) podaljška.</p>	<p>OPOMBA Podaljšek AirChamber lahko pomivate v pomivalnem stroju do 12 krat. Vretje: podaljšek AirChamber lahko prevrete do 12 krat. Sestavne dele podaljška damo v vrelo vodo za 5 minut. Uporabimo čisto posodo napolnjeno s pitno vodo. Po tem očistite podaljšek kot je opisano v 5 korakih. V primeru nejasnosti glede čiščenja, se obrnite na prodajalca ali zastopnika izdelka. Podaljšek zamenjajte z novim po največ 12 mesecih uporabe. Podaljšek lahko zavržete v mešane odpadke.</p>

<p>SILIKONSKA MASKA</p>	<p>1</p> 	<p>2</p> 	<p>3</p> 	<p>4</p> 	
<p>Silikonska maska je dodana zato, da jo povežemo na podaljšek AirChamber za dovod aerosolnih zdravil.</p>	<p>Masko splaknite pod čisto, mlačno vodo.</p>	<p>Dodajte neagresiven detergent in masko operite. Za čiščenje ne priporočamo agresivnih detergentov ali detergentov baziranih na alkoholu.</p>	<p>Pod čisto tekočo vodo masko dodobra sperite.</p>	<p>Masko nato osušite in ohladite.</p>	<p>Sterilizacija Parni sterilizator: v avtoklavu lahko masko sterilizirate pri 134°C za 4 minute. Vrela voda: masko položite v vrelo vodo za 7 minut. Shranjevati stran od sončne svetlobe.</p>



Proizvajalec: Medical Developments int. Limited, 4 Caribbean Drive, Scoresby Victoria 3179, Avstralija

EC REP: E,mergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514AP, The Hague, Nizozemska

Distributer: Pikdare S.p.A., Via Saldarini Catelli 10, 22070 Casnate con Bernate (CO), Italija

Zastopnik za slovenijo: Prolat d.o.o., Praproče 9, 8210 Trebnje (T: 07 30 44 555; E: info@prolat.si; www.prolat.si)