

Becutan KIDS VITS – besedilo za navodilo za uporabo

Becutan KIDS VITS izotonična raztopina za nos izotonično pršilo za nos z morskno vodo

Brez konzervansov

Ustrezna higiena nosu je pomembna za dojenčke, otroke in odrasle. Preveč sluzi v nosnih votlinah lahko poveča razmnoževanje mikrobov in prekomerno izsušenost nosne sluznice.

Becutan KIDS VITS izotonična raztopina za nos zaradi svojega mehanskega delovanja močno hidrira nosne votline in pomaga pri spiranju in odstranjevanju sluzi, kar zlahka omogoča prepustnost.

Becutan KIDS VITS izotonična raztopina za nos ohranja specifičnost vitalnih lastnosti naravne morske vode.

Becutan KIDS VITS izotonična raztopina za nos izhaja iz zaliva Cancale v Bretaniji, ki je znan po kakovosti vode. Ta zaliv se ponaša z izjemnim obsegom plimovanja (12 m), preplavljajo pa ga močni prevladujoči tokovi, ki preprečujejo onesnaževanje voda. Ta edinstvena kombinacija zagotavlja, da se voda nenehno prečiščuje in je tako stalno čista. Vzorčenje se izvede samodejno, ko je kakovost vode optimalna (po obdobju velike plime). Območje vzorčenja je razvrščeno kot razred A in je pod nenehnim zdravstvenim nadzorom (mikrobiološki nadzor, nadzor kemičnega onesnaženja, fitoplanktona in pH).

Sestava:

Prečiščena voda in morska voda (natrijev klorid 0,9 %).

Indikacije:

Pravilna uporaba **Becutan KIDS VITS izotonične raztopine za nos** pri vsakodnevni nosni higieni dojenčkov, otrok in odraslih omogoča terapevtsko pomoč pri nekaterih osnovnih indikacijah, kot so: nazofaringitis, obstruktivni rinitis in sinusitis, suh nos, hripavost zaradi suhe sluznice, kot pomoč pri ORL in pediatričnem zdravljenju.

Navodila za uporabo:

1. Pred uporabo steklenico pretresite in odstranite zaščitni pokrovček. Pri prvi uporabi bo morda potreben nekajkratni pritisk na aplikator, preden se izdelek ne razprši.
2. Nežno vstavite nosni aplikator v eno nosnico in pritisnite črpalko, da nanesete izdelek.
3. Pustite odteči odvečno raztopino, da se izloči sluz, nato jo izpihajte.
4. Ponovite postopek še z drugo nosnico.
5. Očistite konico aplikatorja z vodo in posušite.
6. Zaprite nosni aplikator z zaščitnim pokrovčkom do naslednje uporabe.

Za vsako nosnico uporabite tako pogosto, kot je potrebno.

Navodila za uporabo pripomočka pri dojenčkih:

1. Dojenčka položite z rahlo nagnjeno glavo na eno stran, da olajšate vstop morske vode v nosnico.
2. Pršite nekaj sekund, tako da stisnete glavo pršila.
3. Dojenčka posedite, da mu sluz izteče iz nosu. Obrišite sluz z robčkom.

4. Ponovite na drugi nosnici.
5. Nežno obrišite nosnice, ne da bi robček pregloboko potisnili v otrokov nos. Konico aplikatorja očistite z vodo in posušite.

Nanesite v vsako nosnico 2 do 3-krat na dan.

Kontraindikacije in neželeni učinki:

- Pri priporočenih terapevtskih odmerkih ni znanih neželenih učinkov, če pa se pojavijo stranski učinki, se posvetujte s svojim zdravnikom ali farmacevtom.
- Vsak resnejši neželeni učinek, povezan s tem pripomočkom, je treba prijaviti proizvajalcu, distributerju in nacionalnemu zdravstvenemu organu v vaši državi.

Opozorila:

- Zaradi higienskih razlogov in za preprečevanje prenosa patogenov tega pršila ne sme uporabljati več kot ena oseba.
- Hranite izven dosega otrok.

Shranjevanje in rok uporabnosti:

- Pripomočka ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na škatli in steklenici.
- Hranite v suhem in hladnem prostoru.
- Zavrzite en mesec po odprtju.
- Steklenico in zaščitni pokrov odvrzite v ustrezne zabojnike za smeti.

Na voljo kot:

Becutan KIDS VITS izotonična raztopina za nos 30 ml za dojenčke in majhne otroke, stare od 0 mesecev do 6 let.

Priporočila:

Za dojenčke priporočamo kombinirano uporabo z **Becutan KIDS VITS nosnim aspiratorjem**.

Datum zadnje revizije: 27. 01. 2021



Pharmalink, S.L.

Av. Universitat Autònoma, 13 – Parc Tecnològic del Vallès
08290 Cerdanyola del Vallès – BARCELONA – ŠPANIJA
www.pharmalink.es – Stik za stranke: +34 666 570 401

Distributer za Slovenijo:

ALKALOID-INT d.o.o.

Šlandrova ulica 4

1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija



REF PL0032_BB

LOGO:  ALKALOID