

## **VEČNAMENSKA RAZTOPINA PROCULIN® SOFT LENS s hialuronsko kislino.**

Namenjena čiščenju, odstranjevanju beljakovinskih oblog, dezinfekciji, spiranju, shranjevanju, vstavljanju in vlaženju.

Za mehke kontaktne leče.

### **MEDICINSKI PRIPOMOČEK**

#### **Sestava:**

Aktivne sestavine: Polikvaternij, hialuronat

Konzervans: PHMB 0,0002 %

Natančno preberite navodila in opozorila za ustrezno uporabo izdelka **PROCULIN® SOFT LENS** z vašimi kontaktnimi lečami.

Priporočljivo za občutljive oči

Vsebuje natrijev hialuronat, ki spodbuja vlaženje leč in poveča toleranost obrabe leč zaradi svojih viskozno elastičnih lastnosti. Raztopina vlaži leče, saj s svojo »vodno zaporo«  
vlaži leče cel dan in ne samo po vstavljanju. Tako pripomore k udobnem nošenju leč in zmanjšuje razdraženost in suhost oči.

#### **Previdnostni ukrepi in navodila za uporabo:**

- Pred odstranjevanjem leč iz oči ali posodice za leče si temeljito umijte roke. Roke osušite s čisto brisačo.

Z odvitjem pokrovčka stekleničke boste prekinili varnostno tesnilo.

- Takoj po odstranitvi leče očistite z nekaj kapljicami raztopine **PROCULIN® SOFT LENS**. Leče očistite tako, da jih 10 do 15 sekund previdno drgnete s kazalcem v dlani druge roke.

Leče izperite z raztopino **PROCULIN® SOFT LENS**.

- Za dezinfekcijo položite leče v posodico za leče s svežo raztopino **PROCULIN® SOFT LENS** za vsaj 6 ur.

Po postopku razkuževanja odstranite leče iz posodice za leče, jih izperite z raztopino **PROCULIN® SOFT LENS** in vstavite leče v oči.

- Izperite posodico za leče z raztopino **PROCULIN® SOFT LENS** in pustite, da se posuši na zraku.

- Ne dotikajte se kapalke na steklenički, saj lahko s tem onesnažite raztopino.
- Takoj po uporabi tesno zaprite stekleničko.

### **Druga navodila:**

Po shranjevanju leč v raztopini več kot sedem dni, jih pred uporabo ponovno očistite in razkužite.

Redno menjajte posodico za leče, da preprečite okužbo zaradi kontaminacije.

### **Opozorila:**

- Ne uporabljajte, če je poškodovano varnostno tesnilo.
- Ne mešajte ali uporabljajte raztopine **PROCULIN® SOFT LENS** z drugimi tekočinami za kontaktne leče, razen če je tako navedeno v navodilih za uporabo.
- Vedno zamenjajte preostalo raztopino v posodici za leče s svežo raztopino.
- Ne uporabljajte po datumu izteka roka uporabnosti.
- Ne zamenjajte sistema kontaktnih leč brez predhodnega posveta z zdravnikom/strokovnjakom za kontaktne leče.
- Nikoli ne uporabljajte vode iz vodovoda kot nadomestilo te raztopine za kontaktne leče.

### **Ne uporabljajte:**

Če uporabljate predpisano zdravilo za oči, se pred uporabo zdravila v kombinaciji s kontaktnimi lečami posvetujte z oftalmologom ali strokovnjakom za kontaktne leče.

V primeru draženja oči prenehajte z uporabo in se posvetujte z zdravnikom/strokovnjakom za kontaktne leče.

### **Shranjevanje:**

Hraniti zunaj dosega otrok.

Hraniti pri temperaturi med 4 °C in 25 °C (40 °F in 77 °F).

Zaščititi pred sončno svetlobo.

Raztopino hranite v originalni embalaži.

Porabiti v 3 mesecih po odprtju.

**Stranski učinki:**

Ne uporabljajte **PROCULIN® SOFT LENS**, če ste alergični na eno izmed sestavin.

**CE 0344**

**STERILE A**

01REF1686  
03/2019



**TEGE Pharma B.V.**

Minervum 7384  
4817 ZH Breda  
The Netherlands

