

## PROCULIN LENS potovalno pakiranje

### Raztopina za nego leč

Večnamenska raztopina s hialuronsko kislino. Razkužuje, konzervira, čisti, vlaži, maže, izpira, moči, odstranjuje beljakovinske obloge. Za vse vrste kontaktnih leč. Indicirano za občutljive oči. Vsebuje posodico za kontaktne leče.

### INDIKACIJE

Večnamenska raztopina za razkuževanje, konzerviranje, čiščenje, vlaženje, mazanje, izpiranje in odstranjevanje beljakovinskih oblog z vseh vrst kontaktnih leč, vključno z lečami iz silikonskega hidrogela. Namenjeno občutljivim uporabnikom z nagnjenostjo k sindromu suhega očesa. Priložena je posodica za leče s srebrovimi ioni.

Zahvaljujoč hialuronski kislini izdelek maže kontaktne leče in tako poveča udobje pri daljšem nošenju.

### NAVODILA ZA UPORABO

- Roke dobro umijte in osušite.
- Lečo odstranite, jo položite na dlan in z raztopino nežno podrgnite z obeh strani.
- Lečo sperite z raztopino, da odstranite vse nečistoče.
- Leči položite v posodico za leče ter jo napolnite z raztopino.
- Za razkuževanje kontaktnih leč jih pustite v raztopini vsaj štiri ure ali še bolje preko noči.
- Pred uporabo leč posodico rahlo pretresite.
- Leči sta pripravljeni za uporabo.
- Raztopino odlijte in posodico zaprite.

### OPOZORILA

- Izdelek je sterilan do prvega odprtja plastenke.
- Po uporabi platenko dobro zaprite.
- Izdelek je uporaben 90 dni po prvem odprtju.
- Ne zamrzujte, shranjujte ločeno od virov toplote.
- Shranjujte nedosegljivo otrokom.
- Ni za uživanje.
- Izdelka ne uporabljajte, če ste preobčutljivi na katero izmed sestavin v izdelku.
- V primeru neželenih učinkov prenehajte z uporabo in se posvetujte z zdravnikom.

### SESTAVA

Izotonična raztopina s pH 7,2 vsebuje: poliheksametilen bigvanid (0,0001 %), Mirapol A15, natrijev edetat, polimer metiloksirana in natrijev hialuronat.

### VSEBINA PAKIRANJA

1 100-ml platenka

1 posodica za leče

100 ml



Medicinski pripomoček


ALKALOID logo

**Distributer za Slovenijo:**

ALKALOID-INT d.o.o.

Šlandrova ulica 4

1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija

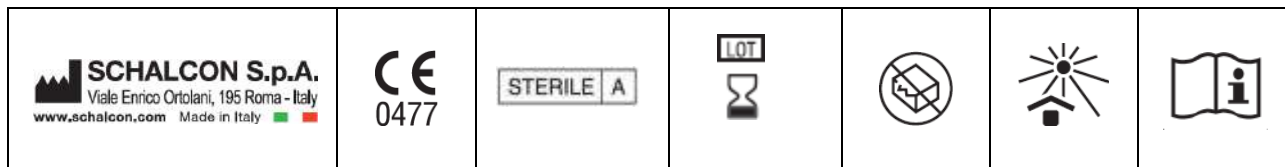

*Dodatne informacije se lahko sporočijo na zahtevo stranke, če ne vplivajo na analizo tveganja, opravljeno na izdelku.  
Spremenljive informacije glede na končni izdelek so označene siv*

