



LOT



CE 0477

270 3

GLEJTE SPODAJ / POGLEDAJ ISPOD

HR Sprej za hlajenje pruža trenutno olakšanje u slučaju uganuća, te bolova u zglobovima i mišićima. Poput leđa, svojim hlajenjem stvara trenutni osjećaj olakšanja. Preporučuje se za smanjenje otekline i boli. UPUTE ZA UPORABU: Prije uporabe dobro protresti bočicu. Prije nanošenja, uvijek testirati proizvod na malom području kože. Dozirati proizvod na udaljenosti od 15 cm i prskati u 2 - 3 kratka intervala. Oprati ruke odmah nakon uporabe. Ponoviti do 3 puta dnevno. Ako simptomi potraju, obratiti se liječniku. Ne koristiti na nadraženoj ili oštećenoj koži. Ne prskati dulje od 2 ili 3 sekunde na istu točku i ne smanjivati udaljenost. Može uzrokovati reške hladne opekline. **OPASNOST:** Vrlo zapaljiv aerosol. Spremik pod tlakom: može se rasprsnuti ako se grije. Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskre, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Ne pušiti. Ne prskati u otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja. Ne bušiti niti spaljivati, čak niti nakon uporabe. Zaštititi od sunčeve svjetlosti. Ne izlagati temperaturama većim od 50 °C. Ne koristiti proizvod u prevelikim i neprimkladnim količinama. Izbjegavati kontakt s očima i sluznicama, ne nanositi na nadražena mjesta. Ako proizvod dođe u kontakt s očima, ispirati vodom. **SASTOJCI:** Butan, Izobutan, Propan, Denaturirani alkohol, Propilen glikol, Mentol.

PROIZVOĐAČ/PROIZVAJALEC: Volcke Aerosol Italy S.r.l., Via delle arti 6 - 26010 Fiesco (CR) (Italia).

DISTRIBUTER: Yasenka d.o.o., Dvanaest rekaristvenika 2/5, 32 000 Vukovar, Hrvatska.

ZA SLOVENIJO: Medical Intertrade d.o.o., Brodšće 12, 1236 Trzin.

OMNiflex

COLD SPRAY

200 ml e



SLO Pršilo za zamrzovanje nudi takojšnje olajšanje pri obremenitvah, bolečinah v sklepih in mišicah. Tako kot led povzroči takojšen občutek mraza, ki nudi olajšanje. Priporočljivo za zmanjšanje otekline in bolečine. NAVODILA ZA UPORABO: Pred uporabo dobro pretresite. Izdelek pred nanosom vedno preizkusite na majhni površini. Sredstvo nanosite z razdalje 15 cm in razpršite v 2-3 kratkih intervalih. Takoj po uporabi si umijte roke. Ta postopek ponovite vsaj 3-krat na dan. Če simptomi ne izginejo, se posvetujte z zdravnikom. Ne uporabljajte na razdraženi ali poškodovani koži. Na isti točki ne podaljšajte nanosa več kot 2/3 sekunde in ne zmanjšajte razdalje. Lahko povzroči resne hladne opekline. **NEVARNOST:** Zelo lahko vnetljiv aerosol. Vsebnik pod tlakom: lahko poči pri segrevanju. Hraniti izven dosega otrok. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker odprtega ognja ali drugih virov vžiga. Prepovedano kaljenje. Ne pršite proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. Ne luknjajte ali sežigajte, tudi po uporabi ne. Zaščitite pred sončno svetlobo. Ne izpostavljajte temperaturam nad 50 °C. Izdelka ne uporabljajte v prevelikih ali neprimernih količinah. Izogibajte se stiku z očmi in sluznicami, ne nanosite na razdražene dele. Če izdelek pride v stik z očmi, jih sperite z vodo. **SESTAVINE:** Butane, Izobutane, Propane, Alcohol Denat., Propylene Glycol, Menthol.



3 858893 1381914